

VCD式カシキ使用方法の説明書

はじめにお読みください

目 次

| | | |
|--------------------|---|----|
| はじめにお読みください | ・ | 1 |
| 1. 使用目的 | ・ | 2 |
| 2. ご使用に際して | ・ | 2 |
| 3. ケースの中に入っているもの | ・ | 5 |
| VCD式カシキ（ゴム球型）の使用方法 | ・ | 7 |
| トレーニング方法 | ・ | 9 |
| 使い終わったら | ・ | 10 |
| 緊急時の対処方法 | ・ | 10 |
| 日常の手入れ | ・ | 11 |
| 消耗品 | ・ | 12 |
| 本製品に関する相談窓口 | ・ | 12 |
| 使用上の注意 | ・ | 13 |

1 : 使用目的
本機器は、器質的あるいは機能的インボデンシスと診断された患者さんに対応する陰茎勃起補助を目的としています。

使用目的以外の使用は決してしないでください。

1. 使用目的

2. ご使用に際して

3. ケースの中に入っているもの

VCD式カシキ（ゴム球型）の使用方法

トレーニング方法

使い終わったら

緊急時の対処方法

日常の手入れ

消耗品

本製品に関する相談窓口

使用上の注意

③：副作用

1) 医療機器としての承認を受けるために実施された臨床試験では、陰茎の疼痛、陰茎の浮腫、陰茎の皮下出血等の症状が現れました。このような症状が出た場合には、

使用をいったん中止し、医師と相談してください。

2) この製品のうちゴムバッキンクは天然ゴムを使用しています。
天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、

ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。

このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

④：重要な基本的注意

海外で陰茎の皮膚壊死が報告されているので、ゴム／パッキングは30分以上使用しないでください。

4) 陰嚢がプラスチック管内部に引き込まれることの無いよう適切な装着を心がけてください。

VCD式カソキンキは、生理的な勃起と異なり、陰圧により血液を陰茎に流入させて陰茎を拡張させていき、次いでゴム／パッキングにより血液が陰茎より流出しないようにして陰茎の拡張を維持させます。

生理的な勃起は血液が循環しているので組織障害をきたしませんが、VCD式カソキンキはゴム／パッキングにより陰茎の血液の循環が止まることが考えられます。

陰茎の組織障害を防止するためにも、ゴム／パッキングを30分以上絶対に連続使用しないでください。

欧米の報告では、薬物中毒で判断能力を失った患者さんがこのことを守らなかつたために陰茎が壊死（腐ること）したという報告があります。したがって、ゴム／パッキングを装着したままアルコールを飲んで泥酔することなどないように十分に注意してください。

なお、いつたんゴム／パッキングを外し休息をとれば問題はありません。

⑤：その他の使用上の注意

- 1) ゴム／パッキングの装着・取り外し時に陰茎をきずつけてしまった場合には、本機器の使用を中止し、医師に相談してください。
- 2) ポンプやプラスチック管を落 下せたりしないよう丁寧に取り扱ってください。

高所より落 下させるなどして強い衝撃を与えると破損する恐れがありますので丁寧にあつかってください。

- 3) 本機器の使用により、射精が可能となる場合がありますので、妊娠を希望しない場合は、医師と相談してコンドームの装着等適切な避妊をしてください。

コンドームを装着する場合は、ゴム／パッキングを装着した後（勃起した後）に行つてください。コンドームを装着して減圧しますと、コンドームが破損する恐れがあります。

陰嚢が内部に引き込まれると、痛みを感じる場合があります。

- 5) 持続勃起症（ゴム／パッキングを装着しているがくとも陰茎が勃起したままの状態が続いた場合）が引き起こされた場合は、速やかに使用を中止し、ただちに医師による適切な処置を受けてください。

現在まで、本機器使用により勃起持続症となつた患者さんはおりませんが、陰茎への注射等により持続勃起症が起きた報告があります。
持続勃起症の治療には、迅速でなければ性機能の回復の予後は悪いと言われています。もし、他の治療と本機器を併用し持続勃起症が引き起された場合は直ちに医師の処置を受けてください。

- 6) 酔つた状態では使用しないでください。


酔つた状態では判断力が低下し、機器の正しい使い方が困難となる恐れがあります。また、寝込んだりしますとゴム／パッキングを30分以上連続で装着することになり、陰茎の組織傷害をきたす恐れがあります。

- 7) 使用中に痛みやトラブルが生じた場合には、ポンプの安全弁を作動して直ちに減圧状態を解除し、使用を中止して医師に相談してください。
- 8) あらかじめ潤滑ゼリーを陰茎全体に塗つてから吸引してください。ただし、次の3つの条件を満たすゼリー以外ではお使いにならないでください。
 - ①油分でできていない。
 - ②水ですぐに荒い流せる。
 - ③低刺激性。

*製品例
スムースゼリー
(快生業研株式会社)

3: ケースの中に入っているもの
まず、ケースの中に入っているものを確認してください。

[ゴム球型]

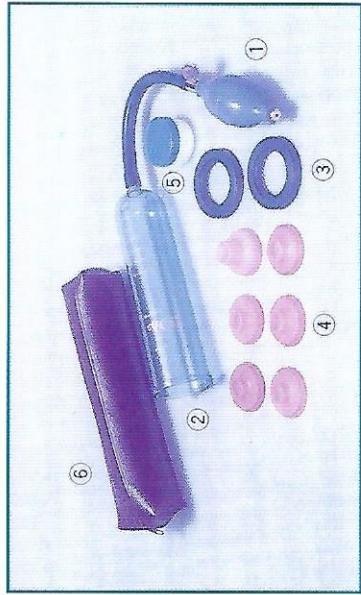

- ① 真空ポンプ（ゴム球型）………1ヶ
- ② プラスチック管……………1ヶ
- ③ アダプター（切れ目無）………1ヶ
- ④ アダプター（切れ目有）………1ヶ
- ⑤ ゴムパッキングBタイプS………1ヶ
- ⑥ 潤滑剤ケース……………1ヶ

| ゴムパッキングをプラスチック管に取り付けるためのものです。 内径は3.5cmです。勃起時の陰茎が抜けないおそれのある方は、切れ目の有るアダプターを使用してください。 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| アダプター 切れ目無 切れ目有 | |


| ゴムパッキングを締めつけるためのゴムです。4種類の大きさがあり、ゴムの表面にS,M,L,LLの刻印があります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---|-----|------|----|---|---|------|----|---|---|------|----|----|-----|------|----|
| ゴムの性質上、使用により全体的に伸びてきますので、アダプターにはまらなくなったら、新しいものと交換してください。 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>サイズ</th> <th>大きさ外径mm</th> <th>外径mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>きつい</td> <td>12.3</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>↑</td> <td>14.3</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>↓</td> <td>15.3</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>LL</td> <td>ゆるい</td> <td>16.2</td> <td>39</td> </tr> </tbody> </table> | サイズ | 大きさ外径mm | 外径mm | S | きつい | 12.3 | 41 | M | ↑ | 14.3 | 41 | L | ↓ | 15.3 | 41 | LL | ゆるい | 16.2 | 39 |
| サイズ | 大きさ外径mm | 外径mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | きつい | 12.3 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M | ↑ | 14.3 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | ↓ | 15.3 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LL | ゆるい | 16.2 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 真空ポンプ | ゴム球型 中間部のネジを緩めると安全弁が作動し、陰圧が解除されます。 |
| プラスチック管 | 0~5の数字は目安です。 入口部分より0までが10cm、5までが15cmです。 |
| アダプター 切れ目無 切れ目有 | ゴムパッキングをプラスチック管に取り付けるためのものです。 内径は3.5cmです。勃起時の陰茎が抜けないおそれのある方は、切れ目の有るアダプターを使用してください。 |
| ゴムパッキング | 陰茎を締めつけるためのゴムです。4種類の大きさがあり、ゴムの表面にS,M,L,LLの刻印があります。 |
| スムースゼリー 潤滑剤 | 陰茎等の皮膚を傷つけないようにするために塗ります。 |
| 携帯用ケース | 右図のように収納できます。 |

VCD式カシキ(ゴム球型)の使用方法

①組立方法


①ポンプの空気孔に、プラスチック管の先端を連結します。少しきついですが、ねじ込んでください。

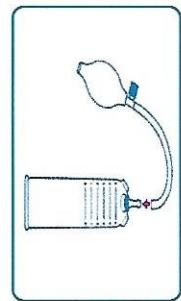

②パッキングの取付方法


Aタイプ (アダプターを使用しても装着できます)

②パッキングの先端を本体管に押し込みます。左手の薬指で押さえます。

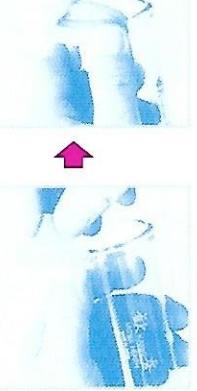


Bタイプ

①パッキングをアダプターにある印に沿っておさめます。アダプターのミリシガシにかかるようにギンクを調節してください。

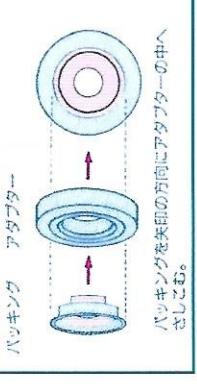


③操作方法

①男性器全體に潤滑剤をたくさん塗り、亀頭をパッキングの方にあてて、ポンプを1~2回操作しますと、亀頭部が管内に入ったら、ゆっくり水を呼び込む音を呼んで、約10秒間待ちます。(20~30秒待つ方がより効果的の人もいます。)

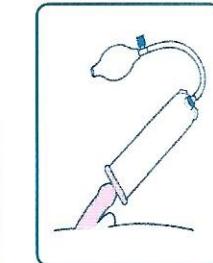


④パッキングの取り外し方

①テイッシュか、ガーゼをすべり止めにして、パッキングの先端を両手でつまみ、前へゆっくり引つ張ると簡単に外れます。男性器に割れ物を壊さずやすくなります。

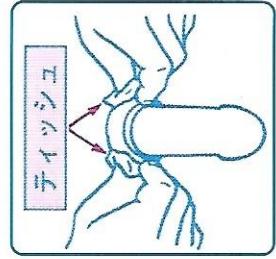


②パッキングがギリくて外しにくい場合は、手で5~6回強くこぎます。

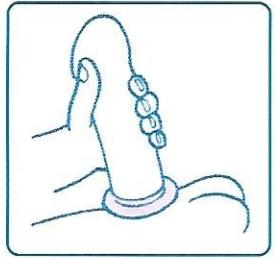

警告

ゴムパッキングは、30分以上連続使用しないでください。特にゴムパッキングを装着したままアルコールを飲んで泥酔したり、寝込んだりすることなどないように十分注意してください。陰茎の皮膚壞死(腐ること)のおそれがあります。

④ポンプは少し硬いので、下図のようになります。4本の指を直角に立ててください。

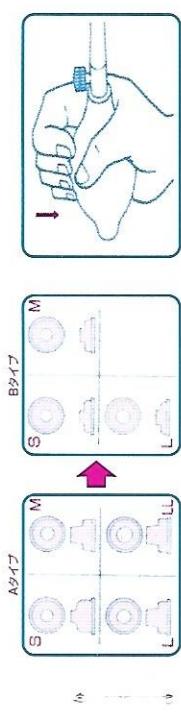

⑤ポンプがキレイに力が抜けます。



取付アダプター使用注意


取り目のついたアダプターを使用するときは「→」印が向いており、必ずその面で壁を押さないでください。壁を押さなければ金の原凶になります。




⑤残った部分を引っ張り、管に完全に力が切れます。




⑥差着完了。

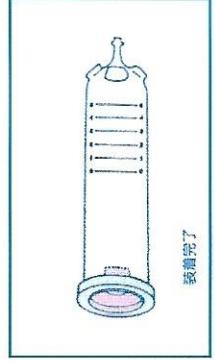


④軽起したら、管にねめたアダプターを印方向に押すと、アダプターとパッキングが同時にはずれます。さらに、男性器からアダプターのみ取り外してください。

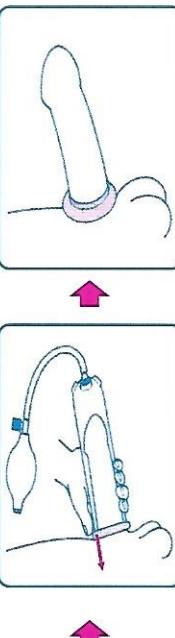

③ポンプ操作を1回し、また10秒間待ちます。1回10秒」を10回繰り返します。

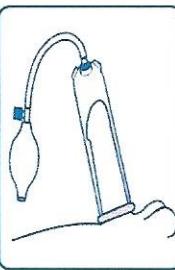

①テイッシュか、ガーゼをすべり止めにして、パッキングの先端を両手でつまみ、前へゆっくり引つ張ると簡単に外れます。男性器に割れ物を壊さずやすくなります。

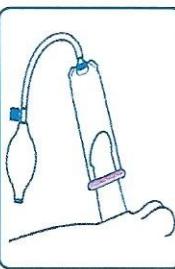

トレーニング方法

初めてご使用いただくにあたつてのお願い

数日から一週間程度、下記のトレーニングを行ってください。
その際、解説書には「ポンプ操作を5～6回早くすると…」とあります。



④解説書7～8ページ③の操作方法の方法で行ってください。

⑤勃起状態にならなくても、きつくなじたらネジを緩め、また操作をしてください。
この繰り返しで、だんだん大きくなってきます。

⑥潤滑剤は、最初クリームからお使いください。


⑦最初は、LJLを使用し、慣れたら他のサイズを使用して、自分に合ったサイズを見つけてください。

①ゴムパッキングを使用しない方法

①プラスチック管にアダプターのみを装着し、

②空気ネジを緩めると1～2cm元に戻ります。

③この方法で空気漏れする場合は、④の方法で行ってください。

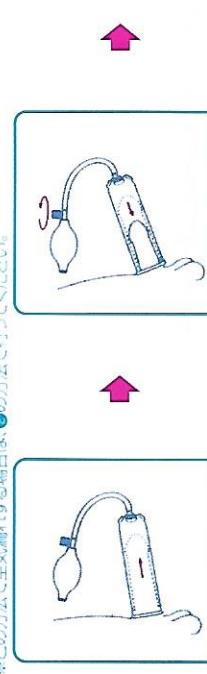


②ゴムパッキングを使用する方法

①ゴムパッキングを管にかぶせ、や二を男生器に塗り、上記と同じ方法でトレーニングしてください。(アダプターを使用してもかまいません)



1

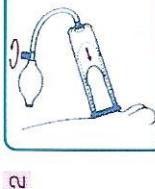

2

緊急時の対処方法

使用後は、ゴムパッキングとアダプターとプラスチック管を中性洗剤で洗った後、水洗いしてください。

使用しているときに痛みがあつたり、性器の異常に気が付いた場合には、速やかに使用を中止してください。その際の対処方法については、①プラスチック管を付けているとき ②ゴムパッキングを付けているとき の2通りの場面について記載しておりますので参考にしてください。


①プラスチック管を付けているとき
プラスチック管を付け、ポンプにより減圧している最中に、中止したくなつた場合には以下の方法に従つてください。

②ゴム球型は中間部のネジを作動させること
ゴム球型は中間部のネジを作動すると安全弁が作動し、陰圧が解除されます。


ネジ



①プラスチック管をアダプターから取り外し、次いで、アダプターとゴムパッキングを陰茎から取り外してください。
外し方は、8ページを参考にしてください。

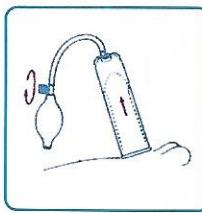

②ゴムパッキングを付けているとき
勃起し、ゴムパッキングを付け、性交に臨むが、性交中のときには使用を中止する場合には、ゴムパッキングを取り外す必要があります。外し方は、8ページを参考にしてください。
どうしても取り外せない場合には、ゴムパッキングを広げ、陰茎がきずつかないようにしてはさみでゴムパッキングに切り口を入れてください。ゴムパッキングは切れます。

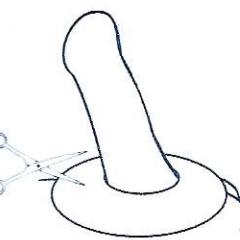

注意



酸・アルカリおよび揮発性・可燃性薬品（シンナー、ガソリン、ベンジンなど）を使用しないでください。万一、それらの薬品が身体や本機器に付着したときは、十分に拭き取ってからご使用ください。

お願い



市販の化粧ぞうきんなどをご使用の際は、その使用上の注意に従ってください。
熱湯を使用しないでください。変形したり劣化を早める場合があります。

警告



本機器の各部品は、弊社指定のものを必ずご使用ください。指定以外のものを使用しますと、期待される効果が得られないことがあります。

消耗品は、日常の使用で破損したり、劣化するもので、ゴム球型ポンプ、プラスチック管、ゴムパッキン、アダプターがこれにあたります。

各部品のお求めにつきましては、別紙の部品価格表をご覧のうえ、販売店または弊社相談室へお申し込みください。

1 真空ポンプの手入れ

乾いた布で拭いてください。

2 プラスチック管の手入れ

プラスチック管は中性洗剤で洗った後、水洗いをしてください。
煮沸や直射日光は劣化を早めます。

本製品に関するご相談窓口

本製品に関するご相談は、下記までご連絡ください。

快生薬研株式会社

〒132-0003 東京都江戸川区春江町 2-48-14-403

TEL 03-6666-8921

祝祭日を除く月曜～金曜の
午前10時～午後5時
アダプター及びゴムパッキンは、中性洗剤で洗った後、水洗いをしてください。
ゴムパッキンは使用すると全体的に伸びてきますので、アダプターにはまらなくなつたら新しいものと交換してください。

FAX 03-6666-8922

使用上の注意

使用にあたっては、医師は患者に「使用方法の説明」を理解させたうえで、さらにに使用上の注意を遵守すること。

- 一般的な注意
1. 本機器の使用に際しては医師が操作及び使用方法を指導し、さらにに使用前に患者自身で十分なトレーニングを行い、操作方法及び使用方法に熟練した上で使用すること。
- 次の患者には使用しないこと(禁忌)
 - (1) 精神障害のため本機器の使用が不可能と考えられる患者
 - (2) 隆起に炎症や傷がある患者や隆起を切断した患者
 - (3) STD(性行為感染症)にかかっている患者
 - (4) 完全視力喪失者(但し本機器の操作方法に熟練した介護者がいる場合にはその限りにあらず)
 - (5) 重度の多発性硬化症の患者
 - (6) 慢端な骨折を作らべ口ニ一病の患者
 - (7) 性交すると腫瘍を損なう恐れがある疾患を有する患者(心疾患、脳血管障害など)
 - (8) 締め付けバンドの取り外しが困難な患者
 - (9) 勃起時の陰茎開闊が13.8cm、陰莖長が16.5cmを超える患者
 - (10) その他担当医師が不適切と判断した患者
 - (11) 例えば、抗血凝凝固物質療法施行中、陰茎PROSTHESIS抜去、海面全体内注射直後、兼状赤血球貧血、持続勃起症のある患者、アルコール依存症又は覚醒剤や麻薬常習者

3. 副作用
(1) 本品の承認申請にあたり実施された臨床試験の結果、陰茎の疼痛378例(3.8%)、陰茎の皮下出血378例(3.8%)、陰茎の発赤278例(2.6%)等の症状が現れた。これらの副作用が発現した場合には、患者に直ちに使用を中止させ適切な治療を受けよう指導すること。

- (2) この製品のうちゴムハッキングは天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、倦怠感、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施してください。

4. 重要な基本的注意
海水で陰茎の皮膚壞死が報告されているので、ゴムハッキングは30分以上使用しないこと。

5. その他の使用上の注意
(1) 急速に陰茎をかけないこと。性器がプラスチック管に入ったら、必ず10秒以上待ってから次のポンプ操作を行ふこと。
(2) 真空ポンプやプラスチック管を落させたりしないよう丁寧に取り扱うこと。
(3) 本機器の使用により、射精が可能となる場合があることから、過剎を希望する患者には適切な避孕方法をとるよう指導すること。
(4) プラスチック管の装着にあたっては、陰囊がプラスチック管内部に引き込まれることのないよう適切な装着方法をとるよう指導すること。
(5) 本機器の使用と他の薬剤との併用等により、持続勃起症が引き起こされた場合は、速やかに使用を中止し、ただちに医師による適切な処置を受けること。
(6) 医師は、患者が暫時状態で使用することのないよう指導すること。
(7) 医師は、患者が使用中に不具合が生じた場合には、真空ポンプの安全弁を作動させ直ちに減圧状態を解除し、使用を中止するよう指導すること。
(8) ゼリーを使用する場合は、次の3つの条件を満たすものを薦めること。
①油分でできていない。
②水でよく洗い流せる。
③低刺激性。

* 製品例：スムースゼリー（快生薬研株式会社）

安全のため必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全のため必ずお守りください」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

| | |
|----------------|---------------------------------------------|
| 表示の意味は次のとおりです。 | |
| 警告 | 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が大きいもの。 |
| 注意 | 誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋、家財などの損害に結びつく可能性があるもの。 |
| お願い | 制約事項や、不具合を避けたためのことがらと医師への相談が必要なことから。 |

警告



ゴムハッキングは30分以上絶対に連続使用しないでください。とにかくに、ゴムハッキングを装着したままアルコールを飲んで泥酔したり、寝込んでしまうなどないように十分注意してください。陰茎の皮膚壊死(腐ること)おそれがあります。

本機器を使用目的(陰茎勃起補助)以外には使用しないでください。けがや故障の原因となることがあります。

本機器はお子様の手の届かないところに保管してください。誤つて口や目等を吸引するなど危険です。

本機器の本体および部品は弊社指定のものを必ずご使用ください。これら以外のものを使用しますと、期待される効果が得られないこともあります。

注意



酔った状態では使用しないでください。機器の正しい使い方が困難になるおそれがあります。

お手入れの際には、酸・アルカリおよび揮発性・可燃性薬品(シンナー、ガソリン、ベンジンなど)を使用しないでください。万一、それらの薬品が身体や本機器に付着したときは、十分に拭き取つてからご使用ください。